

## Multi-Gyn® Vaginal Douche IRIGATOR



### Svojstva

- Žene ga rado prihvataju, ergonomskog je oblika i može se koristiti u bilo kom željenom položaju.
- Savršen je za intenzivnu higijenu vagine, prevenciju vaginalnih infekcija i neugodnosti.
- Ispiranja je optimalno, jer tečnost izlazi iz aplikatora kroz otvore koji se nalaze bočno i napred.
- Specijalni ventil sprečava usisavanje rastvora za ispiranje nazad u bocu iz vagine, kao i previše jak pritisak mlaza.
- Ugodna primena je omogućena zahvaljujući aplikatoru glatke površine sa fleksibilnim uglom u odnosu na bocu.
- Savršen je za upotrebu u kombinaciji sa Multi-Gyn Tablets šumećim tabletama, a mogu se upotrebiti i druge tečnosti za ispiranje.

### Dizajn

The Multi-Gyn Vaginal Douche irigator je ergonomskog oblika, registrovan je u Evropi. Zahvaljujući jedinstvenom dizajnu i funkcionalnosti, jedini je vaginalni irigator koji je dobio status medicinskog sredstva klase I.

Multi-Gyn Vaginal Douche irigator sastoji se od praktične, mekane boce, sa fleksibilnim grlom, koja se lako pritiska. Zaobljeni aplikator glatke površine sa ugrađenim silikonskim ventilom, jednostavno se postavlja zavrtnjem na bocu. Boca se lako pritiska jednom rukom. Zahvaljujući specijalnom silikonskom ventilu, vrši se isključivo ispiranje, a ne dolazi do usisavanja tečnosti nazad u bocu iz vagine. Pored toga, ne stvara se pritisak u unutrašnjosti vagine, tako da je primena Multi-Gyn Vaginal Douche irigatora potpuno bezbedna.

### Primena

- za opštu vaginalnu higijenu
- za intenzivnu vaginalnu higijenu u slučaju pojačanog sekreta, neprijatnog mirisa ili promenjene boje sekreta, svraba, iritacije i osećaja pečenja;
- za sprečavanje vaginalnih infekcija i kao pomoćna terapija u lečenju gljivičnih i bakterijskih infekcija;

Za zdravu vaginu neophodna je dobra i pre svega pravilna higijena, posebno kod seksualno aktivnih žena, za vreme menstruacije i u slučaju vaginalnih tegoba i infekcija. Ispiranjem se odstranjuju ostaci izumrlih ćelija i sekreta, nakupljeni u udubljenjima oko grlića materice, kao i sa samog grlića materice (cerviksa). U slučajevima bakterijskih infekcija, štetni mikroorganizmi se spiraju zajedno sa ćelijama i sekretom.

Multi-Gyn vaginalni irigator spada u medicinska sredstva klase I i namenjen je za prevenciju vaginalnih infekcija kao što su bakterijske i gljivične infekcije i kao pomoćno sredstvo u njihovom lečenju.

### Učestalost upotrebe

Učestalost upotrebe Multi-Gyn Vaginal Douche irigatora zavisi od vaših ličnih higijenskih potreba (neke žene su više podložne neugodnostima od drugih), vašeg načina života, seksualnih aktivnosti (bez zaštite), menstruacije.

- Za dobru higijenu vagine, dovoljno je primeniti Multi-Gyn Vaginal Douche irigator, jednom nedeljno.
- Za pojačanu higijenu vagine, primenite Multi-Gyn Vaginal Douche irigator, tri puta nedeljno.
- Za sprečavanje vaginalnih neugodnosti, upotrebite Multi-Gyn Vaginal Douche-irigator, tri puta nedeljno.

- Za ublažavanje vaginalnih problema i kao pomoć u lečenju vaginalnih infekcija, upotrebite irigator dva puta dnevno, u toku pet dana.

*U slučaju upornih ili povratnih neugodnosti, obratite se vašem lekaru.*

*Posle upotrebe Multi-Gyn Vaginal Douche irigatora savetuje se upotreba vaginalnog gela kisele reakcije, kao što je Multi-Gyn ActiGel ili Multi-Gyn FloraPlus, da bi se obnovila vaginalna flora i pH.*

### Multi-Gyn Vaginal Douche irigator i trudnoća

Ne postoje poznate kontraindikacije za upotrebu Multi-Gyn Vaginal Douche irigatora u normalnoj trudnoći. Zahvaljujući jedinstvenom, registrovanom dizajnu, nema stvaranja pritiska u vagini. Ukoliko želite da zatrudnite, ne savetuje se primena Multi-Gyn Vaginal Douche irigatora najmanje 24 sata posle seksualnog odnosa. Multi-Gyn Vaginal Douche irigator nije kontraceptivno sredstvo.


### Napomena:

Nikada nemojte Multi-Gyn Vaginal Douche irigator iskuvavati ili prati ključalom vodom, jer može doći do trajnog oštećenja.

Da biste dezinfikovali Multi-Gyn Vaginal Douche irigator, isperite ga sa razblaženim sredstvom na bazi hlora.

### Upustvo za upotrebu

Vaginalni irigator se može upotrebiti u bilo kom željenom položaju, dokle god tečnost za ispiranje može slobodno da otiče. Za prikaz upotrebe Multi-Gyn Vaginal Douche irigatora pogledajte crteže.

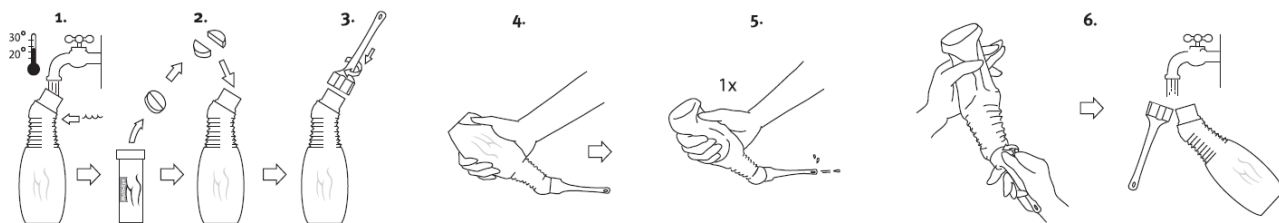

Sledite navedene korake za primenu Multi-Gyn Vaginal Douche- irigatora:

1. Napunite irigator mlakom vodom do vrha rebrastog dela
2. Prelomite Multi-Gyn tabletu i stavite je u vodu
3. Pričvrstite zavrtanjem aplikator na bocu i sačekajte da se tableta rastvori i prestane da šumi.
4. Uvucite aplikator pažljivo u vaginu.
5. Stisnite lagano bocu i isperite vaginu rastvorom za ispiranje. Normalno je da malo tečnosti zaostane u boci.
6. Isperite irigator i aplikator toplom vodom i ostavite da se osuše na vazduhu. Da biste dezinfikovali Multi-Gyn Vaginal Douche-irigator, isperite ga sa razblaženim sredstvom na bazi hlora.

**Broj rešenja za stavljanje medicinskog sredstva u promet: 515-02-01049-14-001**

### Proizvođač:

BioClin BV, Delftechpark 55,  
2628 XJ Delft, The Netherlands

### Nosilac dozvole i distributer:

Oktal Pharma d.o.o. Beograd, Dušana Dude Timotijevića 9, Beograd, 11050 Beograd 22, PAK  
149305, Republika Srbija

[www.multi-gyn.com](http://www.multi-gyn.com)



## **Multi-Gyn® Tablets** šumeće tablete za pripremu rastvora za vaginalno ispiranje



Multi-Gyn Tablets šumeće tablete za pripremu rastvora za vaginalno ispiranje

### **Svojstva proizvoda**

- 1 tableta je dovoljna za pripremu jedne boce sa rastvorom za vaginalno ispiranje
- sadrži isključivo prirodne sastojke, bez konzervansa i parfema
- potpomaže rast laktobacila i stvara optimalne, prirodne uslove u vagini
- tablete su spakovane u malu i diskretnu fiolu
- bezbedna upotreba, bez neželjenih dejstava

U kombinaciji sa Multi-Gyn Vaginal Douche irigatorom, šumeće tablete obezbeđuju optimalnu intimnu higijenu čime sprečavaju vaginalne infekcije i neugodnosti kao što su svrab, iritacija, osećaj pečenja, pojačan sekret i/ili neprijatan miris.

### **Bezbedna higijena pomoću prirodnih sastojaka**

Šumeće tablete su koncentrovane i sadrže isključivo prirodne sastojke, bez konzervanasa. Uobičajeno, u koncentrovanu tečnost za ispiranje je potrebno dodati konzervans, što je štetno za rast korisnih vaginalnih laktobacila, a i za prirodne uslove u vagini. Sa Multi-Gyn šumećim tabletama priprema se savršen rastvor za ispiranje, koji je bezbedan i efikasno održava čistoću vagine. Multi-Gyn šumeće tablete sadrže sastojke koji potpomažu rast laktobacila i ekstrakt Aloeje koji pomaže u stvaranju optimalnog stanja tkiva. Multi-Gyn Tablets, šumeće tablete je najbolje koristiti u kombinaciji sa Multi-Gyn Vaginal Douche irigatorom (medicinsko sredstvo klase I) za optimalnu intimnu higijenu, za sprečavanje i pomoćno sredstvo u lečenju vaginalnih infekcija, kako gljivičnih tako i bakterijskih.

### **Sastav**

Natrijum-bikarbonat, limunska kiselina, *Aloe barbadensis (Aloe vera)* u prašku, laktoza, askorbinska kiselina.

*Multi-Gyn Tablets šumeće tablete nisu namenjene za oralnu upotrebu.*

### **Trudnoća i dojenje**

Nema poznatih kontraindikacija za upotrebu Multi-Gyn Tablets šumećih tableta u toku trudnoće i dojenja.

### **Indikacije**

- za opštu higijenu vagine
- za intenzivnu higijenu vagine u slučajevima pojačanog sekreta, neprijatnog mirisa ili promenjene boje sekreta, svraba, iritacija i osećaja pečenja.
- za sprečavanje vaginalnih infekcija i kao pomoćno sredstvo u lečenju gljivičnih (kvasnih), kao i bakterijskih infekcija.

### **Doziranje**

Primeniti pomoću Multi-Gyn Vaginal Douche irigatora. Rastvorite jednu Multi-Gyn šumeću tabletu u mlakoj vodi, u boci irigatora i uvucite aplikator u vaginu. Stisnite bocu irigatora lagano da biste isprali vaginu rastvorom.

*U slučaju upornih ili povratnih tegoba, obratite se vašem lekaru.*

Posle upotrebe Multi-Gyn Vaginal Douche irigatora savetuje se upotreba vaginalnog gela kisele reakcije kao što su Multi-Gyn ActiGel ili Multi-Gyn FloraPlus, da bi se obnovila vaginalna flora i pH.

**Neželjena dejstva**

Nema poznatih neželjenih dejstava povezanih sa upotrebom Multi-Gyn Tablets šumećih tableta.

**Čuvanje**

Čuvati Multi-Gyn Tablets šumeće tablete u originalnom pakovanju, na suvom mestu, između 10°C i 25°C (sobna temperatura).

**Broj rešenja za stavljanje medicinskog sredstva u promet: 515-02-02661-13-001.**

**Proizvođač:**

BioClin BV, Delftechpark 55,  
2628 XJ Delft, The Netherlands

**Nosilac dozvole i distributer:**

Oktal Pharma d.o.o. Beograd, Dušana Dude Timotijevića 9, Beograd, 11050 Beograd 22, PAK  
149305, Republika Srbija

[www.multi-gyn.com](http://www.multi-gyn.com)

