



Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre svake upotrebe Multi-Gyn LiquiGel-a i sačuvajte ga.



BioClin B.V. Delftechpark 55, 2628 XI, Delft, Holandija,  
www.multi-gyn.com

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre svake upotrebe Multi-Gyn LiquiGel-a i sačuvajte ga.

## Sadržaj

- A. Multi-Gyn Liquigel – tretira i sprečava vaginalnu suvoću**
- B. Kako Multi-Gyn Liquigel deluje**
- C. Indikacije**
- D. Uputstvo za primenu**
- E. Sastav Multi-Gyn Liquigel-a**
- F. Neželjena dejstva**
- G. Interakcije sa lekovima**
- H. Trudnoća i dojenje**
- I. Čuvanje**
- J. Opšte informacije**

### **A. Multi-Gyn Liquigel – tretira i sprečava vaginalnu suvoću**

- ◆ Trenutno suzbija suvoću vagine i pospešuje prirodno vlaženje
- ◆ Dovodi u optimalno stanje tkivo vagine
- ◆ Sprečava iritaciju i predstavlja odlično sredstvo za lubrikaciju
- ◆ Prirodan, bezbedan i štiti vaginalnu floru

### **B. Kako Multi-Gyn Liquigel deluje**

Multi-Gyn Liquigel omogućava trenutno olakšanje kod vaginalne suvoće.

Dovodi tkivo vagine u optimalno stanje i pospešuje njeno prirodno vlaženje.

Osnova Multi-Gyn Liquigel-a je patentirani 2QR-kompleks. To je prirodna supstanca dobijena iz lekovitog bilja, a sastoji se od bioaktivnih polisaharida. Ima jedinstveno svojstvo da neutrališe štetne mikroorganizme na bezbedan i efikasan način.

Stoga je takođe pogodan kao pomoćno sredstvo u toku prirodnog procesa zaceljenja oštećenog tkiva u intimnoj zoni (npr. posle porođaja ili operacije).

Multi-Gyn Liquigel dovodi u optimalno stanje tkivo vagine, smanjuje oticanje i pomaže u sprečavanju infekcija. Ne utiče na prirodnu vaginalnu floru. Multi-Gyn Liquigel trenutno ublažava svrab i iritacije. Multi-Gyn Liquigel je odličan lubrikant, povećava seksualno zadovoljstvo i olakšava kontakt sa intimnom regijom (kao što je stavljanje tampona). Takođe je pogodan za profesionalnu upotrebu pri kliničkom pregledu ginekologa ili akušera.

Redovna primena Multi-Gyn Liquigel-a smanjuje iritaciju i doprinosi optimalnom stanju vagine.

Sastav je prirodan, bezbedan i blag, jer se ne bazira na toksičnim ili jakim sastojcima, tako da nema negativnih neželjenih dejstava.

Multi-Gyn Liquigel je registrovan kao medicinsko sredstvo klase I.

### **C. Indikacije**

- ◆ Vaginalna suvoća u toku i posle menopauze.
- ◆ Vaginalna suvoća uzrokovana hormonskim promenama, lekovima i stresom.
- ◆ Vaginalna suvoća u toku seksualnog odnosa i stavljanja tampona.
- ◆ Vaginalna atrofija, iritacija i nelagodnost.

### **D. Uputstvo za primenu**

Operite ruke i vrhovima prstiju nanosite Multi-Gyn Liquigel na usmine i oko otvora vagine. Možete ga naneti u bilo kom trenutku i onoliko često koliko je potrebno, da bi se postigao osećaj lagodnosti.

Gel ne ostavlja mrlje na vešu. Bezbedan je, blag i pružiće trenutno olakšanje kod vaginalne suvoće, iritacija i svraba.

### **Napomena**

Multi-Gyn Liquigel je aktivni proizvod namenjen vlaženju intimne regije, kondicioniranju i stimulisanju prirodne vlažnosti tkiva. Kao aktivni proizvod, Multi-Gyn Liquigel može izazvati, posle primene, osećaj toplote i peckanja. Ovo je potpuno normalno i nestaće za nekoliko minuta.

### **E. Sastav Multi-Gyn Liquigel-a**

Multi-Gyn Liquigel sadrži preko 25 % 2QR kompleksa. Ostale komponente su: biljni glicerol, prirodno sredstvo za zgušnjavanje, ksantan guma i prirodni regulator (osmoregulator) ćelijske tečnosti, betain.

Multi-Gyn Liquigel ne sadrži konzervanse, hormone, silikone, sastojke životinjskog porekla, jake hemijske supstance ili parfeme i potpuno je bezopasan. Nije mastan, ne ostavlja fleke i rastvara se u vodi. Ne utiče na tampone i kondome.

**Aktivni sastojci** : unakrsni polimer galaktoarabinana i poliglukuronske kiseline\*, glicerol, betain, ksantan guma.

\* 2QR, patentirani bioaktivni polisaharidi

Alergije na sastojke Multi-Gyn Liquigel-a su veoma retke. Savetuje se, u slučaju poznate alergije na biljne sastojke, proba sa malom količinom gela na unutrašnjoj strani podlaktice.

Ukoliko se pojavi crvenilo ili svrab može se zaključiti da postoji alergija na neki od sastojaka Multi-Gyn Liquigel-a. U tom slučaju ne treba primeniti Multi-Gyn Liquigel.

### **F. Neželjena dejstva**

Multi-Gyn Liquigel nema štetnih neželjenih dejstava. Sastav je bezbedan i prirodan. Multi-Gyn Liquigel nije sredstvo za kontracepciju i ne sadrži spermicide. Međutim, uticaj na aktivnost spermatozoida nije ispitan.

### **G. Interakcije sa lekovima**

Nema interakcija Multi-Gyn Liquigel-a sa lekovima.

## H. Trudnoća i dojenje

Nema poznatih kontraindikacija za primenu Multi-Gyn Liquigel-a u toku trudnoće i dojenja.

## I. Čuvanje

Ne savetuje se čuvanje na temperaturama ispod 10°C i iznad 25°C.  
Preporučuje se čuvanje na sobnoj temperaturi.

## J. Opšte informacije

### **Suvoća vagine i nelagodnost su česta pojava.**

Suvoća vagine i nelagodnost javljaju se kod više od polovine žena svih životnih dobi i u svim fazama života. Ovi problemi su naročito izraženi kod žena u toku i posle menopauze usled hormonskih promena, a takođe su na drugom mestu po učestalosti tegoba kod seksualno aktivnih žena.

Mnoge žene prvo primete suvoću vagine kada odnos postane neugodan, čak i bolan. Ovo može umanjiti samopouzdanje, raspoloženje i uticati na uobičajene svakodnevne aktivnosti i prouzrokovati opšti osećaj neprijatnosti.

### **Uzroci suvoće vagine**

Najčešći uzrok je smanjivanje prirodnog vaginalnog lučenja usled hormonskih promena, kao što je u drugoj polovini menstrualnog ciklusa ili u menopauzi. Međutim postoje i drugi faktori koji mogu prouzrokovati ili uvećati problem, kao što su upotreba hormonskih kontraceptivnih sredstava, neki lekovi, sapun, tamponi, stres, premor, trudnoća i porođaj, a i polni odnos bez odgovarajuće lubrikacije prirodnim putem ili uz primenu pogodnog sredstva kao što je Multi-Gyn Liquigel.

**Obavezno se obratite vašem lekaru ili ginekologu ako tegobe uporno traju.**

### **Nosilac dozvole / distributer:**

**Oktal Pharma d.o.o. Beograd**, Dušana Dude Timotijevića 9, Beograd, 11050 Beograd 22, PAK 149305, Republika Srbija

**Broj rešenja za stavljanje medicinskog sredstva u promet:515-02-00793-13-001**

**BioClin Multi-Gyn** linija za intimnu negu sadrži proizvode na bazi patentiranog polisaharidnog kompleksa 2QR (patent u svim zemljama sveta) ekstrahovanog iz Aloja Barbadensis Miler, koji štiti vaginalno tkivo od štetnih bakterija i pomaže stvaranje i održavanje normalne vaginalne flore.

**BioClin Multi-Gyn FemiWash** – pena za redovnu intimnu higijenu

**BioClin Multi-Gyn ActiGel** – olakšava tegobe intimne regije i štiti od bakterijskih infekcija

**BioClin Multi-Gyn Floraplast** - olakšava tegobe intimne regije i štiti od gljivičnih infekcija

**BioClin Multi-Gyn Vaginal Douche** – vaginalni irigator

**BioClin Multi-Gyn Tablets** – šumeće tablete za vaginalno ispiranje

**BioClin Multi-Gyn Compresses** – komprese za olakšanje tegoba u analnom području

